

Masażer POINTRA

punktowa terapia wibracyjna

Instrukcja obsługi




Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

Producent: SUZHOU PINOTEC CO., LTD. No.38, Jingyang Road, Wangting Town, Xiangcheng District, Suzhou, CHINY 	Dystrybutor globalny: TensCare Ltd 9 Blenheim Road Epsom, Surrey KT19 9BE, Wielka Brytania Więcej informacji: +44 (0)1372 723 434 
Podmiot odpowiedzialny w UE: TensCare Europe BV Juliana van Stolbergstraat 52 1723LD Noord-Scharwoude Holandia 	Dystrybucja w Polsce: AP Plan Sp.J. ul.Wolności 13M lokal 102 64-130 Rydzyna TEL: 65 619 3855 Sklep medyczny diaMedica  

www.diamedica.pl

Budowa urządzenia:

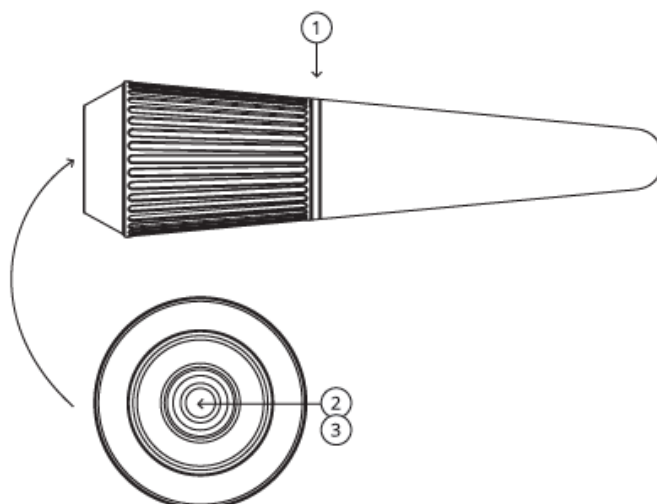

1. **Port ładowania** – dostępny po odkręceniu silikonowej głowicy.
2. **Przycisk wielofunkcyjny** – włączanie/wyłączanie urządzenia oraz wybór trybu pracy.
3. **Wskaźnik stanu akumulatora** – informuje o stanie naładowania i postępie ładowania.

Dane techniczne

Maksymalna prędkość:	8000 obr./min
Zasilanie:	5V / 0.5A
Tryby:	10 unikalnych wzorców terapii FVT (Focal Vibration Therapy – punktowa terapia wibracyjna)
Czas pracy:	do 3 godzin
Czas ładowania:	ok. 1 godzina
Pojemność akumulatora:	320 mAh
Moc maksymalna:	1 W
Napięcie znamionowe:	3.7 V
Waga:	ok. 116 g
Wymiary:	1.5 cm × 3.7 cm × 14 cm

Włączanie i wyłączanie

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie Pointra - domyślnie uruchomi się tryb FVT 1.
- Każde kolejne naciśnięcie przycisku zmienia tryb - dostępnych jest 10 trybów FVT.
- Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UŻYWAJ TYLKO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ. Używaj Pointra zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez Pointra. Nie wykonuj żadnych czynności konserwacyjnych innych niż zalecane przez Pointra.

NIE DLA DZIECI. Pointra i ładowarka nie są przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną. Nie pozwól, aby Pointra był

używany jako zabawka. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się ani Pointra ani ładowarką.

ZMNIJSZENIE RYZYKA URAZU. Ładuj Pointra tylko za pomocą ładowarki producenta. Inne ładowarki mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia. Pointra jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na podrażnioną skórę. Nie używać w okolicy serca, jeśli masz rozrusznik serca.

NIE PRZEŁADOWUJ. Nie pozostawiaj urządzenia do ładowania na dłużej niż godzinę po pełnym naładowaniu. Akumulator zawiera system zabezpieczeń, aby uniknąć ryzyka przeładowania. Jednak przeładowanie może z czasem skrócić jego żywotność.

NIE PRACUJ POD KOCEM LUB PODUSZKĄ. Może dojść do nadmiernego nagrzewania i spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA I ŁADOWARKI. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Ładuj urządzenie tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia mieści się między 0°C i 40°C. Nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 40°C, na przykład w bezpośrednim świetle słonecznym, w pojeździe lub metalowym budynku latem.

UTYLIZACJA AKUMULATORA. Zawsze utylizuj zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Skontaktuj się z punktem recyklingu w Twojej okolicy, aby uzyskać informacje o lokalizacjach recyklingu. Nawet rozładowane akumulatory zawierają pewną ilość energii.

NIE DEMONTUJ. Demontaż lub nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem, pożaru lub narażenia na chemikalia akumulatora. Gwarancja traci ważność, jeśli urządzenia lub ładowarka zostaną zdemontowane lub jeśli jakiegokolwiek części zostały usunięte.

SERWIS. Jeśli urządzenie lub ładowarka nie działa prawidłowo, została mocno uderzona, upuszczona, uszkodzona, pozostawiona na zewnątrz lub wrzucona do wody, gdy nie jest całkowicie zamknięta, nie używaj i skontaktuj się z dystrybutorem (patrz kontakt na początku instrukcji obsługi). Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani demontować urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.


Tryby terapii FVT

Masażer POINTRA oferuje 10 zróżnicowanych trybów FVT, zaprojektowanych w celu:

- stymulacji tkanek głębokich,
- unoszenia i rozluźniania warstw powięziowych,
- poprawy krążenia i regeneracji mięśni.

Aby zmienić tryb, naciskaj kolejno przycisk zasilania.

Po przejściu przez 10 trybów urządzenie wróci automatycznie do trybu FVT 1.

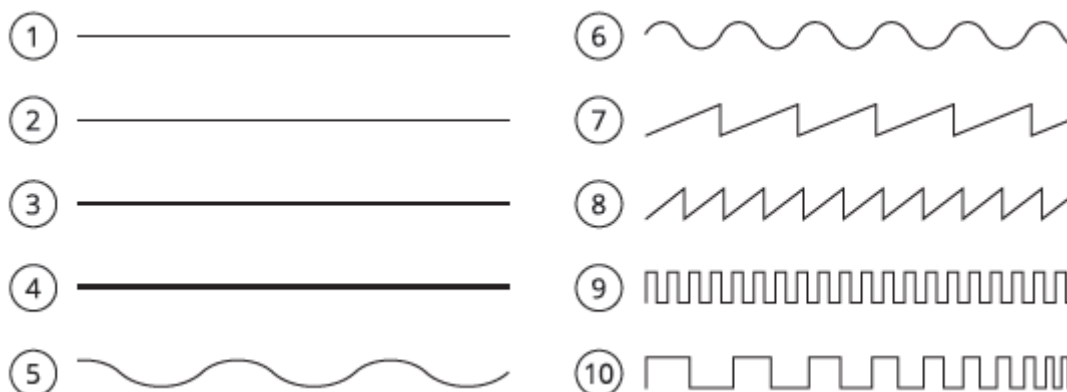

⚠ Ostrzeżenie: nie używaj urządzenia dłużej niż 10 minut w jednej sesji.

Ładowanie urządzenia

- Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie do pełna, aby wydłużyć żywotność akumulatora.
- Gdy poziom baterii spadnie poniżej 20%, wskaźnik zacznie migać.
- Aby uzyskać dostęp do portu ładowania, odkręć silikonową głowicę.
- Podłącz dołączony kabel do portu USB zasilacza.



- Podczas ładowania dioda miga, a po pełnym naładowaniu świeci światłem ciągłym.
- Po zakończeniu ładowania odłącz kabel zasilający.

GWARANCJA:

Producent gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres 2 lat od daty pierwotnego zakupu. Jeśli produkt wykazuje taką wadę, producent wymieni go na rzecz konsumenta bezpłatnie. Dwuletnia ograniczona gwarancja obejmuje wymianę produktu wyłącznie w przypadku wad produkcyjnych. Nie udziela się żadnych innych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. W przypadku wystąpienia roszczenia gwarancyjnego, jedynym środkiem zaradczym przysługującym użytkownikowi jest wymiana produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub wad produktu wynikających z wypadku, niewłaściwego użytkowania, nadużycia, brudu, wody, nieuzasadnionego użytkowania, normalnego zużycia, serwisowania przez nieautoryzowane agencje serwisowe lub niezapewnienia rozsądnej i niezbędnej konserwacji, w tym między innymi regularnego ładowania.